




吉为医疗
JIWEI MEDICAL

适用于体表手术伤口的皮肤闭合处理。


(吉易合)[®]

皮肤吻合器

S型

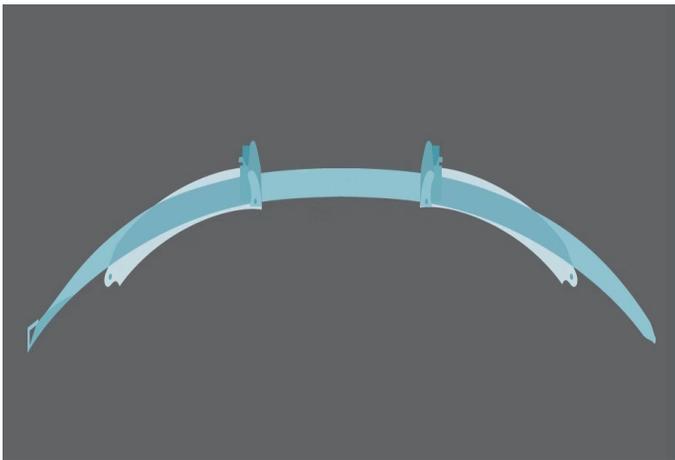

D型

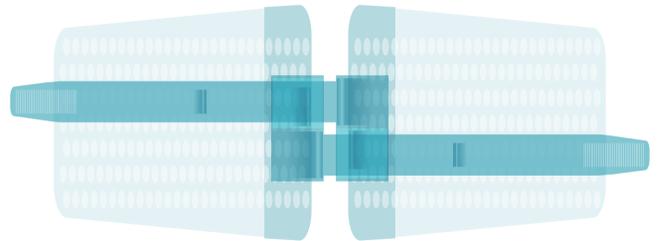

产品型号：S型、D型

产品规格：

S624

S626

S628

D2115

D2117

D2120

工作原理

本产品根据机械爬行和应力松弛的原则，运用皮肤粘弹性原理进行设计。将两片粘贴板置于创面的两侧，通过牵拉牵张条带动粘贴板作用使创缘皮肤牵张，直至使创面闭合，达到无创免缝合闭合创口的作用。

灭菌级

STERILE R

辐照灭菌



一次性使用



吉为医疗

JIWEI MEDICAL

无创免缝，可逆调节；
双向牵引，减张闭合；
可视观察，低致敏性；
牢固可靠，安全美观；

结构组成

STRUCTURE
COMPOSITION

产品由粘贴板、固定扣、牵张条和保护膜组成。

适用范围

适用于体表手术伤口的皮肤闭合处理。

使用方法

- 1.将粘贴板与皮肤粘贴牢固。
- 2.撕去粘贴板背面的离型纸。将粘贴板成对粘贴于创面两侧的皮肤上。按压粘贴板，直至其被牢牢地固定于皮肤上。
- 3.S型：先将牵张条插入一侧粘贴板的固定扣内，再穿入远端相对应的粘贴板的固定扣内牵拉牵张条，确保牵张条的挡板已被第一个粘贴板的固定扣挡住。缓慢而渐进地拉紧牵张条，以达到牵拉皮肤、闭合伤口的作用。D型：拉住吻合器两边的牵张条使伤口闭合紧。如需多个产品，按照上述方法，依次粘贴本产品，使伤口完全闭合。

杭州吉为医疗科技有限公司

HANGZHOU JIWEI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

生产许可证编号：浙食药监械生产许20130071号

注册证编号/产品技术要求编号：浙械注准20192020615

注册人/生产企业/售后服务单位：杭州吉为医疗科技有限公司

生产地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2636号1幢3层312室

联系电话：0571-89187013

传真：0571-88669807

网址：www.jiwei-med.com

禁忌症

- 1、对本产品材质严重过敏的患者禁用；
- 2、在组织水肿区，需谨慎使用该产品；
- 3、不具备足够粘贴空间的皮肤表面禁用；
- 4、粘贴部位在活动关节部位或弯曲不平整皮肤表面禁用；
- 5、包装破损或过期的产品禁用。

贮存

本产品应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气味、阴凉、干燥、通风良好、清洁的室内。不要放置在超过40℃的环境里。